

**Information zur Anwendung der Selbsttests (Stand 16.03.21)  
Xiamen Boson Biotech – Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test**

**Vor** Beginn der Testung sollst du dir mehrmals deine Nase putzen.



Anschließend wäscht du dir einmal gründlich die Hände



und legst dir ein Papiertuch als Unterlage auf den Tisch.




Öffne nun die Schachtel und entnimm alle Testteile.

Suche das Röhrrchen und drücke es in den Ständer der Verpackung.



1. Öffne die „Extraktionslösung“ (Fläschchen mit Flüssigkeit).

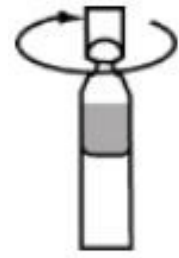


**VORSICHT:** Öffne vom Gesicht weg und achte darauf, dass du nichts von der Flüssigkeit verschüttest.

2. Drücke vorsichtig die gesamte Flüssigkeit in das Röhrchen.



**VORSICHT:** Vermeide den Kontakt der beiden Behälter. Achte darauf, dass der Behälter nicht umfällt.

3. Suche den Tupfer in der versiegelten Verpackung.

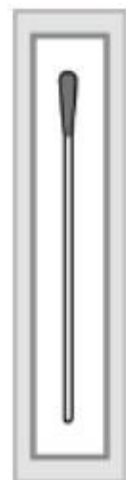

**Achtung:** Die weiche, textile Spitze des Tupfers, darf nicht mit den Händen berührt werden!

4. Ziehe die Verpackung auf und nimm den Tupfer **vorsichtig** heraus.




**VORSICHT:** Die weiche, textile Spitze des Tupfers nicht mit den Händen berühren!

5. Führe den Tupfer vorsichtig **ca. 2,5cm** tief in ein Nasenloch ein.

**Drehe den Tupfer 3-4 Mal.**

Belasse ihn einige Sekunden im Nasenloch.

Wiederhole den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.

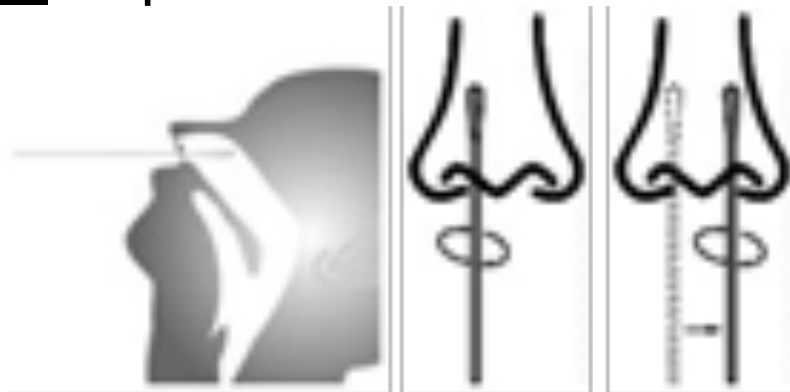


**Achtung:** Das kann sich unangenehm anfühlen! Führe den Tupfer nicht tiefer ein, wenn du starken Widerstand oder Schmerzen spürst!

6. Führe den Abstrichtupfer mit deiner Probe in das Röhrrchen ein. **Drehe** den Tupfer nun **3-5mal**.




**Belasse ihn 1 Minute im Extraktionspuffer.**

7. **Während** du den Tupfer herausziehst, **drücke** das Röhrrchen **zusammen**, um so viel Flüssigkeit wie möglich zu behalten.

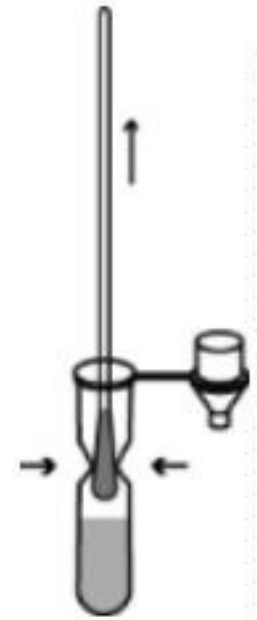

Lege den Tupfer dann auf dein Papiertuch.

8. Setze die Kappe auf das Röhrrchen.

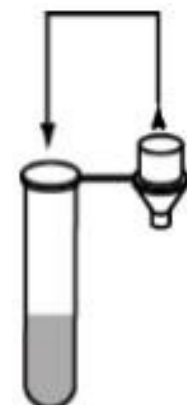


9. Öffne den Beutel und entnimm die Testkassette. Lege sie auf eine flache und ebene Oberfläche.



***VORSICHT: Die Testkassette nach dem Öffnen sofort verwenden.***

10. Drehe das Röhrchen um und drücke 3 Tropfen (75  $\mu$ l) der **Flüssigkeit** auf die Probenvertiefung (S).

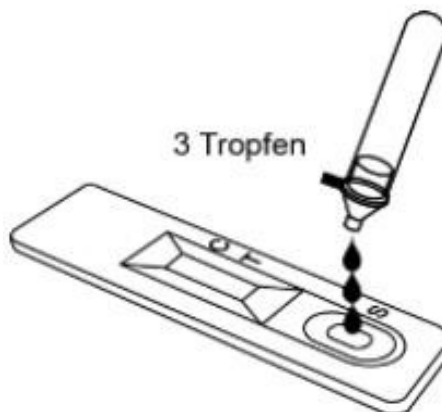




***VORSICHT: Vermeide Luftblasen In der Vertiefung (S)***

11. Stelle deinen Timer auf 15-20 Minuten.

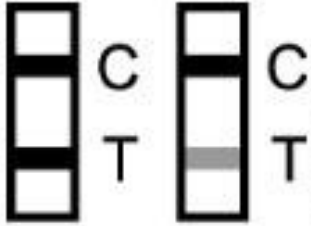

***Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis verfälschen.***

<p><b>p</b> <b>o</b> <b>s</b> <b>i</b> <b>t</b> <b>i</b> <b>v</b></p>	<p>Wenn <b>innerhalb von 15-20</b> Minuten <b>zwei Farblinien</b> – eine Farblinie im Kontrollbereich (C) und eine Farblinie im Testbereich (T) – erscheinen, so ist der Test <b>gültig und positiv</b>. Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Ein positives Ergebnis schließt eine gleichzeitige Infektion mit anderen Krankheitserregern nicht aus.</p>	 <p>Positive</p>
<p><b>N</b> <b>e</b> <b>g</b> <b>a</b> <b>t</b> <b>i</b> <b>v</b></p>	<p>Wenn <b>innerhalb von 15-20</b> Minuten eine <b>Farblinie</b> im Kontrollbereich (C) erscheint, jedoch <b>keine Farblinie</b> im Testbereich (T) zu sehen ist, so ist der Test <b>gültig und negativ</b>. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekulardiagnostische Methoden bestätigt werden.</p>	 <p>Negativ</p>

<b>u n g ü l t i g</b>	<p>Wenn <b>innerhalb von 15-20</b> Minuten <b>keine Farblinie</b> im Kontrollbereich (<b>C</b>) erscheint, so ist der Test <b>ungültig</b>.</p> <p>Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.</p>	 <p>Ungültig</p>
--	---	---

**→ Alle Testmaterialien im Müllsack entsorgen!**

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Nach  
Haut-  
kontakt**

Waschen Sie die Haut mit Wasser ab - sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin

**Nach  
Augen-  
kontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen.  
Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

**Bei  
Schlucken/  
Einnehmen**

Waschen Sie den Mund mit Wasser aus - sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin.